



safe&care



UMA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL POR UM FUTURO MAIS VERDE

São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. Agora mais do que nunca, neste período de pandemia do novo coronavírus, é importante criar práticas sustentáveis.

safe&care

MÁSCARA

USO PROFISSIONAL E SOCIAL REUTILIZÁVEL 5 LAVAGENS

NÍVEL 2



Máscaras têxteis destinadas à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em períodos de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

Nota Importante!

As máscaras têxteis de nível 2 e nível 3, não são enquadradas como dispositivos médicos ou como equipamentos de proteção individual.

Nome do fabricante: **VIEIRA POCARGIL SA**

Endereço: **Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Povoá Lanhoso**

Marca Comercial ou código/Ref.º: **PMSL2 #SAFE&CARE**

N.º lote | Mês | Ano de fabrico: **LOT1 /MAIO 2020**

Composição das matérias-primas: **TECIDO 75%CO 25%PP**

Identificação do tamanho (criança/adulto): **Adulto**



CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO

ENSAIO/NORMA: CONFORMIDADE DE CONFEÇÃO / MI

RESULTADOS:

Máscara REF. PMSL2 - NÍVEL 2

A máscara apresenta conformidade de confecção.



NORMA DE PERMEABILIDADE AO AR E REQUISITOS

ENSAIO/NORMA: PERMEABILIDADE AO AR / EN ISO 9237:1995

RESULTADOS:

valor médio (l/(m².s) ou mm/s): 62,2

C.V. (%) 9,7

I.C. (95%) ±8,4

caudal médio de ar (l/min): 8

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Superior ou igual a 8 l/min

NOTA: Os valores de requisitos mínimos são baseados na caracterização de máscaras cirúrgicas certificadas pela norma EN 14683: 2019 TIPO I



FRENTE



AVESSO



NORMA DE AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DE PARTICULAS

ENSAIO/ NORMA: AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS / MI 142/00

RESULTADOS:

PRC (superior ou igual a 3 µm) (%) - 97

PRC (0,5 µm a 0,7 µm) (%) - 28

Máscaras nível 2, para profissionais em contacto com o público:

PRC (superior ou igual a 3 µm)

- Superior ou igual a 90%



NORMA DE TRATAMENTO PRÉVIO

ENSAIO/NORMA: LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA / ISO 6330:2012

RESULTADOS:

Máquina de lavar utilizada: Tipo A

Programa de lavagem: 6N (60°C)

Carga total (kg): 2

Detergente utilizado: ECE + Perborato de sódio +TAED

Processo de secagem: Suspensão

Número de ciclos de lavagem e secagem: 5



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: 5

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização.

O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.



INSTRUÇÕES DE USO

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.

Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta.

Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- e) Recomenda-se a utilização da máscara por um período máximo de 4h a 6h por dia e ser lavada.



safe&care

geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600